

**KULLANIM AMACI :**

Coretests ERKEN Hamilelik testleri hızlı renk değişimi içeriği ile idrar içindeki HCG ( Human Chorionic Gonadotropin ) seviyesini tespit eden erken gebelik testidir.

Bu doğrultuda Coretests Pregnancy testi gebeliği, cinsel ilişkiden 7 gün sonra, beklenen adetten 5-7 gün önce \* %99'un üzerinde doğrulukla, en pratik şekilde belirir.

**ÖZET :**

HCG ( Human Chorionic Gonadotropin ) gebelik gerçekleşikten kısa bir süre sonra hızlı şekilde insan vücudunda gelişen bir glikoz proteinidir. Normal gebelik durumlarında HCG hamilelik gerçekleşikten en erken 7 gün sonra insan vücudunda tespit edilebilir. Normal durumlarda kadınlarda 5mIU/ml civarında olması gereken HCG miktarı, görülmeyen (hamilelik sonrası görülmeyen) ilk adet sonrası çok hızlı bir şekilde artarak 100mIU/mL seviyesini aşar ve gebeliğin 10-12 inci haftasında 100.000 – 200.000 mIU/ml seviyelerine ulaşır. Bu durumda hamileliğin en erken döneminin tespiti için 10mIU/ml HCG değerini limit değeri olarak alan Coretests Erken Gebelik testi gebeliğin belirlenmesindeki en erken test olarak değerlendirilmelidir.

**Coretests Pregnancy ERKEN Hamilelik Testlerinin ÇALIŞMA PRENSİBİ**

Coretests Pregnancy ERKEN Hamilelik testleri hızlı renk değişimi içeriği ile idrar içindeki HCG ( Human Chorionic Gonadotropin ) seviyesini tespit eden erken gebelik testidir. Test materyali anti-beta HCG tutucu ile kaplanmıştır ve HCG tespit ettiği zaman reaksiyon göstererek pembe renkli çizgilerin göstergede belirginleşmesini sağlar. Test cihazının üzerinde 2 adet çizgi oluşumu söz konusudur. Bunlardan biri kontrol çizgisi (C) diğeri test çizgisidir ( T). Kontrol Çizgisi ( C ) referans çizgisidir. Pozitif sonuç için Test ve Kontrol çizgilerinde pembe çizgi belirginleşmelidir. Negatif sonuçta ise Test çizgisi hiç oluşmaz.

**KULLANMADAN ÖNCE**

1. Kullanmadan önce lütfen prospektüs'ü dikkatlice okuyun.
2. Kullanım tarihi geçmiş test kitlelerini kullanmayınız. Sahte, sertifikasız ve test raporu olmayan düşük fiyatlı ürünlere itibar etmeyiniz.
3. Test kiti kullanılabildiği kadar orijinal paketinde açılmadan beklemelidir. Daha önceden açılmış test kitlelerini kullanmayınız.
4. Kullanılmış cihazı tekrar kullanmayınız ve kullandığınız test kitlelerini çöpe atınız.

**SAKLAMA VE MUHAFAZA**

Test cihazı açılmamış ambalajında 2-30 C de muhafaza edilir. Test cihazı üzerinde belirtilen son kullanım tarihine kadar kullanılabilir.

**İDRAR NUMUNESİ ALMA**

İdrarı numunesini temiz bir kap içine koyunuz. Testi mavi sapından tutarak 10sn boyunca Max ( testin alt kısmında belirtilen maksimum seviye çizgisi ) seviye göstergesini geçmeyecek şekilde idrar numunesine batırınız. Sabah çok erken saatte idrar örneği alıp test yapmayınız. (sabah ilk idrar) Sabah erken saatlerde HCG oranları genellikle yüksektir.

**MATERYALLER :**

Ürünle Beraber Gelen Materyaller

1. 1 adet strip tipi Coretests Pregnancy 10mIU/ml gebelik test cihazı.
2. Prospektüs

Gerekli Fakat Ürünle Beraber Gelmeyen Materyaller  
İdrar Kabı, saat ( zaman ölçücü)

**TESTİN UYGULANMASI**

Testin uygulanacağı ortam. Testi oda sıcaklığında 15-30 C arasında uygulayınız. Test için şartları hazır olana kadar ürünü açmayınız.

1. Önce bir kap içinde idrar numunesini hazırlayın. Ürünü ambalajından çıkarınız. Testi mavi sapından tutarak 10sn boyunca Max seviye göstergesini geçmeyecek şekilde idrar numunesine batırınız. Daha sonra testi sırtüstü temiz bir yüzeye yatırınız.
2. Pembe çizgilerin belirmesi için bekleyin. Pozitif sonuç 40 saniye içinde görünecektir. Buna rağmen negatif sonucun teyit edilmesi için 5dk beklenmesi gerekmektedir. ( 30 dakikadan sonra sonuç okumayın)

**SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ**

**Pozitif Sonuç ( Gebeliğin Gerçekleştiği Durum ) :** Eğer iki pembe çizgi görünüyorsa sonuç pozitif demektir. Bu durum çok büyük olasılıkla hamile olduğunuzu işaret eder. ( Test Çizgisi ( T ) ve Kontrol Çizgisi ( C ) pembe ise ) Not : Test Çizgisinin koyuluk miktarı vücuttaki HCG miktarına göre değişmektedir. T bölgesinde oluşan her tondaki pembe çizgi gebeliğin pozitif olduğunu gösterir.

**Negatif Sonuç ( Gebeliğin Gerçekleşmediği Durum ) :**

Sadece kontrol çizgisi ( C ) görünür. Test çizgisi ( T ) görülmez. Bu durum 10mIU/ml HCG miktarı algılanmadığından negatif anlamındadır. Bu durum gebe olmadığınızı veya testi çok erken uyguladığınızı gösterir. Eğer emin değilseniz 48 saat sonra testi tekrarlayınız.

**Herhangi Bir Sonucun Çıkmaması :** Kontrol çizgisi görünmez, (Yetersiz idrar numunesi eklenmesi veya yanlış bir işlem yapılması sonucunda karşılaşılan sonuçtur. Her şey doğru olmasına rağmen hiçbir çizgi görünmezse yerel satıcınıza başvurun)

**KALİTE KONTROLÜ**

Coretests Pregnancy Testini kullanırken arızalı olup olmadığını anlamanız mümkündür. Test sonrasında ürünün üzerinde kontrol çizgisi ( C ) belirginleşirse ürün problemsiz olarak çalışıyor demektir. Eğer test doğru uygulandığı takdirde ürünün üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa ürün arızalı demektir. Bu durumda yerel satıcınızla görüşün.

**SINIRLAMALAR :**

1. Testten önce çok fazla sıvı alışı idrardaki HCG miktarını düşürecektir. Bu nedenle testten önce çok fazla sıvı alıyorsanız HCG oranı normal değerinin altında görünecektir.
2. Hamilelik dışındaki bir çok etken HCG miktarını yükselteceği için yanlış pozitif sonuç vermektedir. Bu durumlar kişinin meme kanseri olması, rahim kanseri olması, gırtlak kanseri olması, trofoblastik hastalıklar, vücutta tümör bulunması vb.
3. Doğurganlıkla ilgili ilaçlar yanlış pozitif sonuç çıkmasına neden olabilir...

**ÜRÜN PERFORMANSI :****Hassasiyet ve Özellikler:**

Coretests Pregnancy Testi idrar içindeki HCG oranının 10mIU/ml üzerinde veya 10mIU/ml'ye eşit olup olmadığını test eder ve bu sonucu üzerindeki pembe çizgiler sayesinde ile gösterir.

**SORULAR VE CEVAPLAR :**

- Soru:** Hamile olduğumdan şüphe duyduktan ne kadar süre sonra Coretests ERKEN HCG Hamilelik Testini uygulamalıyım?  
**Cevap:** Coretests ERKEN HCG Hamilelik Testini en erken olarak cinsel ilişkiden 7 gün sonra, beklenen adetden 5-7 gün önce uygulayabilirsiniz.
- Soru :** İlk gün sabah ilk idrar numunesi ile test yapabilir miyim?  
**Cevap :** Testi gün içinde herhangi bir zamanda uygulayabilirsiniz fakat sabah çok erken saatte ilk idrar örneği ile test yapmayınız. Sabah erken saatlerde HCG oranları genellikle yüksek çıkmaktadır. Bu durum sahte pozitif sonucu verebilmektedir.
- Soru :** Testin düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim ?  
**Cevap :** Coretests HCG Testini kullanırken arızalı olup olmadığını anlamanız mümkündür. Test sonrasında ürünün üzerinde kontrol çizgisi ( C ) belirginleşirse ürün problemsiz olarak çalışıyor demektir. Eğer test doğru uygulandığı takdirde ürünün üzerinde hiçbir çizgi oluşmazsa ürün arızalı demektir. Bu durumda yerel satıcınızla görüşünüz.
- Soru :** Test sonuçları hamile olmadığını gösteriyorsa ne yapabilirim ?  
**Cevap :** Bu idrar örneğinde HCG ye rastlanmadığını gösterir. Bu durum çok büyük olasılıkla hamile olmadığınızı gösterir. Hamile olduğunuza düşünüyorsanız 48 saat sonra testi tekrarlayınız.

**Home Health UK Ltd.**  
LONDON England, United Kingdom  
[www.homehealth-uk.com](http://www.homehealth-uk.com)

**Coretests Türkiye : Öztürk Dış Ticaret**  
Ataç1 Sok 27/9 Kızılay Ankara – Türkiye